

iSens light avec diverses applications

Important. La ligne/fil rouge est uniquement destinée à la visualisation. Elle est destinée à vous aider à positionner le iSens light. Le iSens light fait une ligne droite d'environ 2-2.5m à la hauteur du capteur de distance ("deux yeux"). Les possibilités d'application sont très larges grâce à sa méthode de mesure exacte (ligne droite).

Utilisations possibles du lit



iSens light à côté du lit. Se lever devrait déclencher un appel.



iSens light sur la table de nuit comme système d'alerte précoce pour les personnes présentant un risque élevé de chute.

Applications possibles dans la salle de bains



iSens light près de la salle de bain. Entrer dans la salle de bain devrait déclencher un appel.



iSens light dans la salle de bain. Le lavabo peut être utilisé. L'utilisation des toilettes ou de la douche doit déclencher un appel.

Applications possibles pour la porte de la chambre



iSens light pour la porte de la chambre. Positionnement en fonction de la porte et de la pièce.

Un appel est lancé lorsqu'on quitte la pièce.

Applications possibles de la table/chaise



iSens light est debout derrière la chaise. .



En repoussant le fauteuil respectivement en se levant, un appel doit être déclenché.