

iSens light mit verschiedenen Anwendungen

Wichtig! Der rote Strich/Faden dient nur der Visualisierung. Er soll Ihnen als Hilfe dienen, um eine Positionierung des iSens light vorzunehmen. Der iSens light macht auf der Höhe des Distanzsensors („zwei Augen“) eine gerade Linie von zirka 2-2.5m. Die Einsatzmöglichkeiten sind durch sein exaktes Messverfahren (gerade Linie) sehr gross.

Einsatzmöglichkeiten beim Bett



iSens light neben dem Bett.
Aufstehen soll ein Ruf
auslösen.



iSens light auf dem Nachttischmöbel als
Früherkennung für stark Sturz gefährdete
Menschen.

Einsatzmöglichkeiten im Badezimmer



iSens light beim Badezimmer.
Betreten des Badezimmers
soll einen Ruf auslösen.



iSens light im Badezimmer. Das Lavabo darf
benutzt werden. Benutzung der Toilette
oder Dusche soll einen Ruf auslösen.

Einsatzmöglichkeiten bei Zimmertür



iSens light bei Zimmertür.
Positionierung je nach Tür und
Zimmer.

Beim Verlassen des Zimmers wird ein Ruf
ausgelöst.

Einsatzmöglichkeiten beim Tisch/Stuhl



iSens light steht hinter dem Stuhl.



Beim Zurückschieben des Stuhls bzw. Aufstehen soll ein Ruf ausgelöst werden.